

Zuverlässigkeit bei empfindlichen Venen



Helping all people
live healthy lives



BD Neoflon™


Venenverweilkatheter in der Größe 26 G

BD Neoflon™

Venenverweilkatheter in der Größe 26 G

Der BD Neoflon™ Venenverweilkatheter ohne Zuspritzventil ist sehr gut für die Punktion kleiner und empfindlicher Gefäße bei neonatalen, pädiatrischen und geriatrischen Patienten geeignet.

BD Neoflon™ in der Größe 26 G (lila) hat den gleichen Innendurchmesser und die gleiche Flussrate wie BD Neoflon™ in der Größe 24 G (gelb). Der klinische Vorteil des 26 G Katheters liegt im kleineren Außendurchmesser, der das Verhältnis des Gefäßlumens zum Außendurchmesser verbessert. Dies ermöglicht eine optimale Blutströmung um den Katheter und eine bessere Hämodilution, und es werden weniger Irritationen an der Intima der Vene verursacht¹.

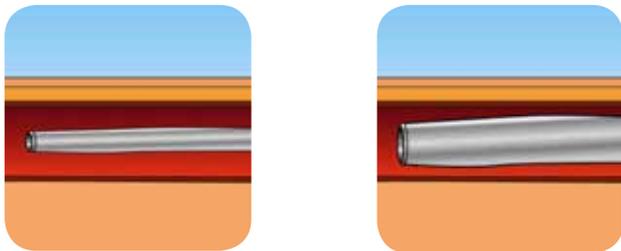

Der BD Neoflon™ Venenverweilkatheter ist speziell für die Problematik bei der Punktion kleiner Venen und im neonatalen Bereich konzipiert:

- Das besondere Design der abnehmbaren Flügelabdeckung ermöglicht bei Anwendung verschiedener Punktionstechniken eine einfache Handhabung trotz der geringen Größe des Instrumentes.
- Der Katheter von BD Neoflon™ besteht aus weichem PTFE, einem Material, das eine geringe Neigung zum Knicken aufweist. Die Katheterspitze hat eine konische Form und ist abgeschrägt; sie unterstützt durch das spezielle Design eine einfache Punktion und minimiert das Risiko für Komplikationen.
- Die beweglichen Flügel ermöglichen eine sichere Befestigung auch an der Hand oder am Arm von Neonaten, ohne dass die Extremität ruhiggestellt werden muss; gleichzeitig wird das Risiko für mechanische Irritationen reduziert.

Produkt-Nr.	Beschreibung	ISO Farbcode	Flussrate	VE
391350	24 G x 19 mm	gelb	13 ml/min	50
391349	26 G x 19 mm	lila	13 ml/min	50



Deutschland: BD · Tullastr. 8-12 · 69126 Heidelberg · Tel. 06221 3050 · www.bd.com/de
Österreich: BD · Concorde Business Park 1/E/1/7 · 2320 Schwechat · Tel. 01 7063660 · www.bd.com
Schweiz: Becton Dickinson AG · Postfach · 4002 Basel · Tel. 061 4852222 · www.bd.com/ch