

# BD Sentry™ Sicherheitslanzette

...zur Punktion der Fingerbeere

- **einfach**
- **ergonomisch**
- **sicher**




Farbe	Art.-Nr.	Beschreibung	PZN
	369528	1,5mm x 28G (0,36mm)	04948374




Helping all people  
live healthy lives


## Handhabungshinweise

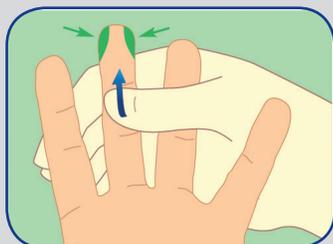

Reinigen Sie die  
Punktionsstelle.

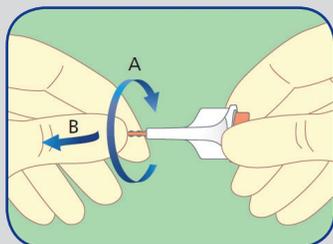

Drehen Sie den Kanü-  
lenschutz (A) und ziehen  
Sie ihn ab (B).

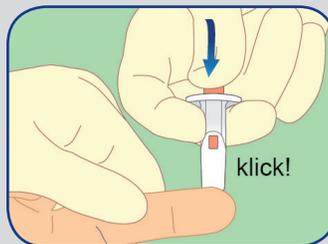

Positionieren Sie die Lan-  
zette an der gewünsch-  
ten Stelle und drücken  
Sie auf den Auslöser.  
Nach erfolgreicher Punktion  
hören Sie ein Klicken. Die  
Nadel zieht sich automa-  
tisch ins Gehäuse zurück.



Entsorgen Sie die Lan-  
zette in einem Kanülen-  
abwurfbehälter entspre-  
chend den Vorschriften  
Ihrer Einrichtung.