

activaMask®

Technisches Datenblatt


Typbezeichnung	Medizinische Gesichtsmaske EN14683:2019 Typ IIR
Handelsmarke	activaMask
Produkt	Medizinische MNS-Gesichtsmaske
Produktbeschreibung	3-lagig, mit Filter(BFE>98%) und elastischen Ohrenbändern, mit eingearbeitetem, formbaren Nasenbügel, für den einmaligen Gebrauch
Bestimmungszweck	Tröpfcheninfektionsprophylaxe, Patientenschutz und eingeschränkter Schutz für den Träger der Maske, Operations-, Pflege und Hygiene-Bereich
EN Spezifikation	CE gemäß MPG - Richtlinie 93/42 EWG - Klasse 1 Produkt EN14683:2019 - Typ IIR
Zertifikate	EU-Konformitätserklärung nach Verordnung (EU) 745:2017 CE-Konformitätserklärung
Material	Äußere Lage (farbig): Polypropylen Vlies - hydrophob Mittlere Lage: Polypropylen Meltblown Vlies - BFE >98% Innere Lage (weiß) Polypropylen Vlies - hydrophil Nasenbügel - Draht mit Polyethylenbeschichtung Ohrenbänder - Polyester / Elasthan
Gebrauchshinweis	Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich
Einschrenkung der Verwendung	Der Anwender ist gehalten, ggf. die Arteikeleignung für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen
Allergiehinweis	Latexfrei, glasfaserfrei
Lagerung	Bei Raumtemperatur in eine, trockenen und gut belüfteten Raum lagern
Größen	Standardgröße (B) 17,5 c (H) 9,5 cm
Farbe	Weiß / Blau
Verpackungseinheit (VPE)	50 St. / Spenderbox
Kennzeichnung VPE	Mögliche Hinweise auf VPE beachten
1 Karton	50 VPE=2.500 Stück
1 Euro-Palette	20 Kartons
Ursprungsland	Deutschland

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine Garantierte zusicherung von Produkteigenschaften und begründet kein vertragliches Rechtsverständnis.

Anwendungshinweise




1. Vor dem Anlegen der Maske Hände waschen

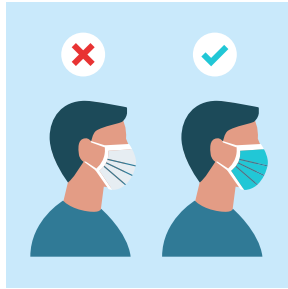


2. Sicherstellen, dass die farbige Seite der Maske nach außen zeigt



3. Platzieren Sie den Nasenbügel auf Ihrem Nasenrücken

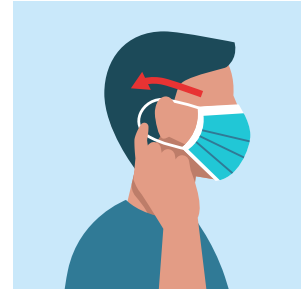


4. Fixieren Sie die Bänder hinter Ihren Ohren

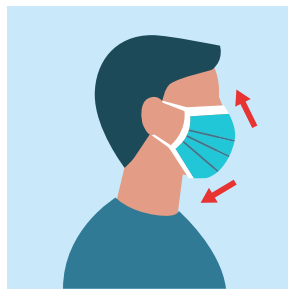

5. Bedecken Sie Mund und Nase komplett und stellen Sie sicher, dass die Maske eng anliegt



6. Pressen Sie den Nasenbügel fest an Ihren Nasenrücken

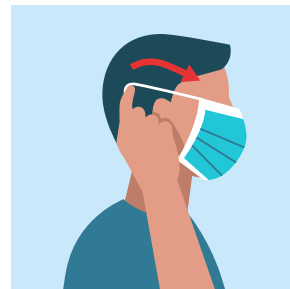

7. Entfernen Sie die Maske mit sauberen Händen von hinten an den Bändern.



8. Entsorgen Sie die Maske in einem geschlossenen Behälter, ohne die vorderseite dieser zu berühren



9. Korrekt angelegte Maske



10. Die Maske während des Tragens nicht berühren, bei Berührung der Maske Hände waschen



11. Ersetzen Sie die Maske sobald sie zu feucht geworden ist und verwenden Sie diese nicht wieder