

# schülke →



Der Reinigungsverstärker für gigasept® FF ist ein alkalischer Reiniger. Er enthält einen speziellen Korrosionsschutz für Aluminium.

## Reinigungsverstärker für gigasept® FF

### Unser Plus

- sehr materialschonend
- sehr gute Reinigungskraft bei Blut, Serum und Eiweiß

### Anwendungsgebiete

Der Reinigungsverstärker für gigasept® FF wird bei der Aufbereitung von flexiblen Endoskopen zur Vorreinigung oder in Abmischung mit gigasept® FF eingesetzt. [CE]

### Anwendungshinweise

1 % Reinigungsverstärker für gigasept® FF immer in die schon fertige Gebrauchslösung von gigasept® FF mit separatem Messbecher zudosieren. Kontakt der beiden Konzentrate vermeiden. Diese Lösung täglich erneuern.

Antrocknen des Konzentrates und der Gebrauchslösung von Reinigungsverstärker für gigasept® FF auf Flächen oder an Instrumenten vermeiden, da ansonsten Bildung unlöslicher Rückstände möglich.

#### Materialverträglichkeit:

- nicht geeignet für alkaliempfindliche Materialien, z.B. Zink
- für Aluminium geeignet

#### Anwendungskonzentration/Einwirkzeit:

1 %ig (d.h. 10 ml auf 1 Liter Wasser) der jeweiligen fertigen Gebrauchslösung von gigasept® FF zudosieren. In Abmischung mit gigasept® FF richtet sich die Einwirkzeit nach der für das Desinfektionsmittel vorgegebenen Einwirkzeit.

CE 0297



# Reinigungsverstärker für gigasept® FF

## Produktdaten

### Zusammensetzung:

Kennzeichnung gem. VO (EG) 648/2004: < 5 % Phosphonat

Weitere Inhaltsstoffe: Korrosionsinhibitoren, pH-Regulatoren

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,09 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 100 °C / Methode: ISO 2719
Form	flüssig
pH	ca. 12,7 / 20 °C / Konzentrat

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
Rein. Verst. für gigasept FF 2 l FL	5/Karton	177002

## Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Wannen-Set 10 l Deckel transp. SE	144508
Wannen-Set 30 l Deckel transp. SE	144608
Wannen-Set 30 l Hahn/Deckel transp SE	144610
Wannen-Set 3 l Deckel transp. SE	144308
Wannen-Set 5 l Deckel transp. SE	144408

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt Reinigungsverstärker für gigasept® FF finden Sie im Internet unter [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch).

Für individuelle Fragen:

Customer Care

Telefon: +41 466 55 44

E-Mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.