

Körperpflege

OPTIWASH®

Feuchte Einmal-Waschhandschuhe zur Ganzkörperwaschung

- Reinigung und Pflege - ohne Einsatz von Wasser, Seife und Handtüchern
- kalt und warm einsetzbar
- dermatologisch getestet

Produktbeschreibung

Die feuchten **OPTIWASH** Einmal-Waschhandschuhe aus weichem Vlies dienen der sanften und professionellen Reinigung des ganzen Körpers oder einzelner Körperbereiche, insbesondere bei immobilen Patienten.

Die wiederverschließbaren Packungen enthalten jeweils zehn Waschhandschuhe, mit denen sämtliche Körperregionen eines Patienten gereinigt werden können. Hierbei sind **OPTIWASH** Einmal-Waschhandschuhe sowohl warm und damit besonderes angenehm für den Patienten, als auch kalt, beispielsweise bei fiebernden Patienten oder in heißen Sommermonaten, einsetzbar.

Durch die Verwendung eines sehr milden, pflanzlichen Reinigungstensides und die pflegenden Wirkstoffe Aloe Vera, Allantoin und Glycerin, besitzen die **OPTIWASH** Einmal-Waschhandschuhe nicht nur sanft reinigende, sondern auch pflegende Eigenschaften.

Die Verwendung von **OPTIWASH** Einmal-Waschhandschuhen, die jeweils nach Reinigung einer Körperregion verworfen werden,

verhindert zudem eine Übertragung von Keimen von einer Körperregion auf eine andere.

OPTIWASH Einmal-Waschhandschuhe sind gebrauchsfertig und können direkt eingesetzt werden. Im Vergleich zu Handtüchern und Waschlappen müssen **OPTIWASH** Einmal-Waschhandschuhe nicht aufbereitet werden. Der Anwender spart damit Zeit und Kosten. Die feuchten **OPTIWASH** Einmal-Waschhandschuhe stellen demzufolge eine hygienische und kostengünstige Lösung zur Reinigung einzelner Körperregionen oder des ganzen Körpers eines Patienten dar.

Anwendungsgebiete


OPTIWASH Einmal-Waschhandschuhe sind geeignet zur milden Reinigung:

- einzelner Körperregionen bei Inkontinenz oder Stomapatienten
- des ganzen Körpers bei immobilen Patienten
- besonders empfindlicher Haut, bei der auf eine Waschung mit Wasser und Seife verzichtet werden sollte
- zuhause und unterwegs



Anwendung

Einen **OPTIWASH** Einmal-Waschhandschuh aus der wiederverschließbaren Verpackung entnehmen und die zu reinigende Hautregion abreiben. Zur Ganzkörperwaschung für jede Hautregion einen neuen **OPTIWASH** Einmal-Waschhandschuh verwenden. Die Reinigung in der Reihenfolge der Nummerierung in der Abbildung durchführen.

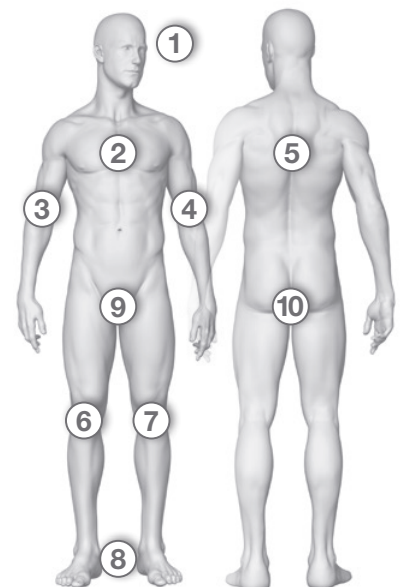

OPTIWASH®

Feuchte Einmal-Waschhandschuhe zur Ganzkörperwaschung

OPTIWASH feuchte Einmal-Waschhandschuhe können kalt oder warm eingesetzt werden.

Warme Anwendung:

OPTIWASH feuchte Einmal-Waschhandschuhe in der geschlossenen Verpackung bei 600 Watt für 20 bis 30 Sekunden in der Mikrowelle erhitzen. Vor der Anwendung die Temperatur auf Verträglichkeit überprüfen. Angebrochene Verpackungen nicht erneut erwärmen.

Kühlende Anwendung:

OPTIWASH feuchte Einmal-Waschhandschuhe vor der Anwendung im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.

Es wird empfohlen die Packung patientenbezogen zu verwenden und innerhalb eines Tages zu verbrauchen.

Besondere Hinweise

Nur äußerlich verwenden.

Waschhandschuhe nach Gebrauch mit dem Hausmüll, nicht über die Toilette entsorgen.

Inhaltsstoffe

Aqua, Glycerin, Allantoin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Caprylyl/Capryl Glucoside, Citric Acid, Sodium Citrate, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Lieferformen

Einzelpackung	VE	PZN	Art.-Nr.
10 Einmal-Waschhandschuhe (24 x 14,5 cm)	24 x 10	11636534	00-639NK-T010

Produktstatus

Entspricht der EU-Kosmetikverordnung.

Umweltinformation

Die Produkte der Dr. Schumacher GmbH werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt.



Die Dr. Schumacher GmbH ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS.

Wir sind Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.